




BENOIT SYSTEMES

Motorisez-vous

LES 3 POSITIONS A MEMORISER

LA POSITION NEUTRE Pour mettre et enlever la motorisation	LA POSITION « EMBRAYEE » Pour rouler avec la motorisation
	
LA POSITION « DEBRAYEE » Pour une utilisation manuelle du FRM* sans retirer la motorisation	
	

* Fauteuil Roulant Manuel

COMMENT PASSER DE L'UNE A L'AUTRE DES POSITIONS

EMBRAYER DEPUIS LA POSITION NEUTRE

Pour rouler avec la motorisation

Vous avez installé la motorisation sur les crochets, poignées en position neutre. Il vous faut maintenant :

1. Embrayer complètement la poignée **droite**.
2. Embrayer la poignée **gauche**.
3. Rentrer les deux poignées télescopiques.




DEBRAYER DEPUIS LA POSITION EMBRAYEE

Pour rouler en roues libres sans retirer la motorisation

Sortir les poignées télescopiques

1. Débrayer la poignée **gauche** et la ramener légèrement vers l'arrière.
2. Rentrer la poignée télescopique et continuer le mouvement vers l'arrière jusqu'à venir caler la poignée contre la butée anti-balancement (**voir zoom ci-contre**).
3. Débrayer et ramener la poignée **droite** contre le dossier.

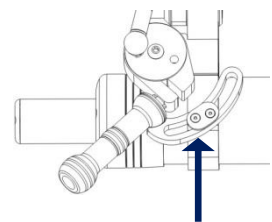


Butée anti-balancement

DE LA POSITION DEBRAYEE A LA POSITION NEUTRE

Pour enlever la motorisation du fauteuil roulant lorsque vous êtes en roues libres

Retirer d'abord l'anti-bascule puis la batterie.

1. Embrayer la poignée **droite**.
2. Dégager la poignée **gauche** de la butée et mettre en position neutre.
3. Mettre la poignée **droite** en position neutre.

 Il est conseillé de mettre les freins sur le fauteuil



EMBRAYER DEPUIS LA POSITION DEBRAYEE

Pour rouler avec la motorisation après avoir roulé en roues libres

1. Embrayer la poignée **droite**.
2. Dégager la poignée **gauche** de la butée et l'embrayer.
3. Replier bien les poignées télescopiques.



DE LA POSITION EMBRAYEE A LA POSITION NEUTRE

Pour désinstaller après avoir roulé avec la motorisation

Enlever l'anti-bascule et la batterie.
Sortir les deux poignées télescopiques.

1. Mettre d'abord la poignée **gauche** en position neutre.
2. Recommencer l'opération avec la poignée **droite**.



Une vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de Benoit Systèmes sous le nom « **Position des manettes** »