

## DIAGNOSTIC ET RÉOLUTION DE PANNE

<b>Le tableau de bord du boîtier de commande ne s'allume pas ou clignote</b>	
<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Batterie mal verrouillée	Retirez légèrement la batterie et réenclenchez-la, puis positionnez l'élastique
Câble du boîtier de commande mal connecté ou détérioré	Vérifiez la connexion, l'état du câble
Problème au niveau des connecteurs rouges	Vérifiez le bon état des connecteurs et la bonne position des contacts
Défaillance batterie	Contactez votre revendeur agréé
Défaillance d'un élément de la motorisation	Comptez le nombre de leds qui clignotent et contactez votre revendeur agréé
Le contact a été mis lorsque le joystick n'était pas en position neutre	Coupez le contact et rallumez
Il est impossible de mettre en marche le vérin	Mettez l'appareil à l'arrêt pour pouvoir actionner le vérin (les freins doivent être activés pour utiliser le vérin)
<b>Le tableau de bord s'allume normalement mais l'appareil ne roule pas</b>	
<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Les repose-pieds sont au sol	Relevez les repose-pieds à l'aide du vérin
Les freins sont débrayés	Tournez le bouton de débrayage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Le réglage de puissance est trop faible	Augmentez la puissance
Un obstacle se situe devant les roues avant ou arrière de l'appareil	Dégagez l'environnement de tout obstacle
Une ou deux courroies sont défectueuses	Contactez votre revendeur agréé
<b>L'appareil fait du bruit</b>	
<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Un moteur est défectueux	Contactez votre revendeur agréé
Un roulement est défectueux	Contactez votre revendeur agréé
Des vis de réglage sont desserrées	Resserrez les vis
<b>Le bloc batterie ne fournit pas de courant</b>	
<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Batterie déchargée	Rechargez-la
Chargeur défectueux	Contactez votre revendeur agréé
Une connexion est défectueuse	Vérifiez les cosses et les connexions
Batterie vétuste	Contactez votre revendeur agréé et remplacez-la.