

DIAGNOSTIC ET RÉOLUTION DE PANNE

La bande de roulement des pneus est usée rapidement	
Causes possibles	Solutions
Pneus de mauvaise qualité	Installer de bons pneus
Pneus sous-gonflés	Gonfler les pneus entre 5 et 8 bars
Pression des galets sur les pneus insuffisante	Régler la pression
Le pneu est usé sur le flanc intérieur	
Causes possibles	Solutions
Le protège galet touche le pneu	Contactez votre revendeur
Le support de la roue du fauteuil est desserré	Bloquer correctement ce support
Le fauteuil tourne en rond	
Causes possibles	Solutions
Un frein du fauteuil est serré	Le desserrer
Un moteur est défectueux	Contactez votre revendeur
La motorisation fait du bruit	
Causes possibles	Solutions
Une partie du fauteuil touche une roue	Vérifier visuellement l'état du fauteuil
Un moteur est défectueux	Contactez votre revendeur
Un roulement est défectueux	Contactez votre revendeur
Un protège galet touche le pneu	Contactez votre revendeur
Une manette d'embrayage ne tient pas embrayée	
Causes possibles	Solutions
Mauvais réglage des rotules	Contactez votre revendeur
Déformation (suite à choc ou autres...)	Contactez votre revendeur
Le rack batterie ne fournit pas de courant	
Causes possibles	Solutions
Batterie déchargée	La recharger
Chargeur défectueux	Contactez votre revendeur
Une connexion est défectueuse	Vérifier les cosses et les connexions
Batterie vétuste	Contactez votre revendeur et la remplacer

Ce diagnostic n'est donné qu'à titre informatif mais en cas d'anomalie, rapprochez-vous de votre revendeur agréé BENOIT SYSTEMES.