

**BENOIT** SYSTEMES



# LIGHT DRIVE 2.1


BENUTZERHANDBUCH



← Folgen Sie Uns!

[WWW.BENOITSYSTEMES.COM](http://WWW.BENOITSYSTEMES.COM)





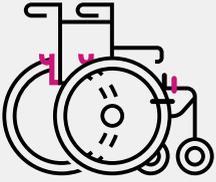

Ihr Rollstuhl ist mit **Hakenstangen und Haken** ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Ihr elektrisches Power Add-On sehr schnell anzubringen. An der Vorderseite Ihres Rollstuhls befindet sich eine **Halterung für die Steuerung**, die den Joystick aufnimmt.


## 1 INSTALLATION DES POWER ADD-ONS

1. Ziehen Sie die Bremsen am Rollstuhl an, um das Installieren zu erleichtern.
2. Richten Sie die beiden Kupplungsgriffe nach hinten (Neutralstellung). Ziehen Sie bei Bedarf den schwarzen Kupplungsknopf. 
3. Halten Sie das Power Add-On mit seinem oberen Griff fest und setzen Sie die Achsen auf die Haken.
4. Stellen Sie sicher, dass die Achsen richtig positioniert sind.

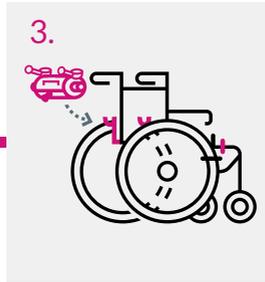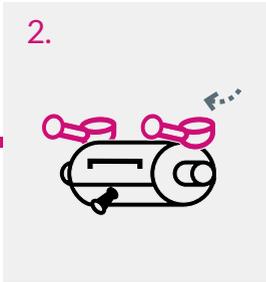


## 2 VERRIEGELUNG DER GRIFFE

1. Verlängern Sie beide Griffe, um mehr Kraft zu gewinnen.
2. Verriegeln Sie beide Griffe immer beginnend mit der rechten Seite.

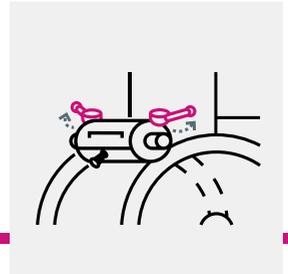



## 3 PLATZIERUNG DES JOYSTICKS

1. Platzieren Sie den Joystick in die Joystick-Halterung an der Vorderseite des Stuhls.
2. Verlegen Sie das Joystick-Kabel neben dem Sitz, um Reibung am Rad zu vermeiden.
3. Stellen Sie die Joystick-Höhe bis zum Anschlag ein.

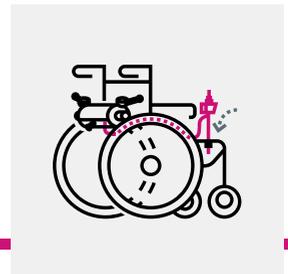


## 4 EINSETZEN DER BATTERIE

1. Setzen Sie den Batterieträger auf den Batterieschlitten am Power Add-On.
2. Drücken Sie den Batterieträger fest an, bis die Stecker hörbar ineinander greifen.

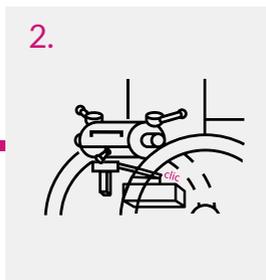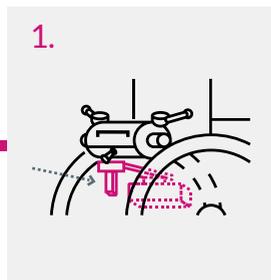


## 5 ANBRINGUNG DES KIPPSCHUTZES

Stecken Sie den Kippschutz in den hinteren Griff des Power Add-on (Rad nach unten gerichtet).

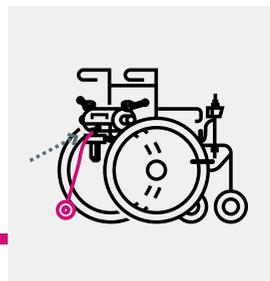

### EXTRA FEATURE

Einfaches Entriegeln der Kupplungsgriffe genügt, um das Power Add-On zu lösen und Ihren gewohnten manuellen Rollstuhl zurückzubekommen.

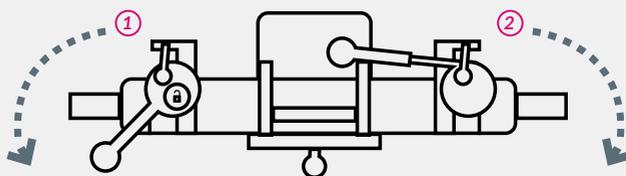



- ① Entriegeln Sie den linken Griff und drehen Sie ihn nach rechts.
- ② Entriegeln Sie den rechten Griff und legen Sie ihn ganz gegen die Rückenlehne.

## 6 ABNEHMEN DES POWER ADD-ONS

Ziehen Sie die Bremsen am Rollstuhl an, um das Herausnehmen zu erleichtern.


1. Lassen Sie die Griffe eingerastet.
2. Entfernen Sie den Kippschutz und hängen Sie ihn an die dafür vorgesehene Stelle an der Batterie.
3. Entriegeln Sie die Batterie mit Hilfe der Rackverriegelung und ziehen Sie sie nach hinten.
4. Nehmen Sie den Joystick ab und stecken Sie ihn in die Aufbewahrungshalterung am Power Add-on und verstauen Sie ihn in der dafür vorgesehenen Position am Heck des Motors.
5. Stellen Sie die Griffe in die neutrale Position (ziehen Sie den schwarzen Knopf).

Heben Sie den Power-Add-on an, indem Sie den oberen Griff ergreifen. Die Achsen sollten sich von den Haken lösen.

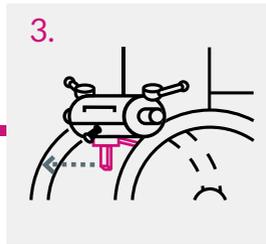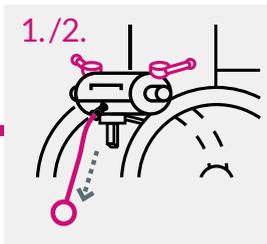


## 7 DAS AUFLADEN DER BATTERIE

Wenn die Batterie am Rollstuhl bleibt, schließen Sie das Ladegerät an den Joystick an.

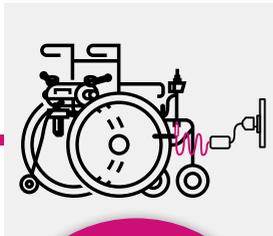

Wenn die Batterie ausgebaut ist, schließen Sie das Ladegerät an den roten Anschluss der Batterie an.

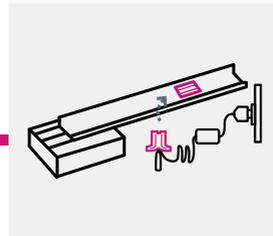

Schließen Sie dann das Ladegerät an die Stromversorgung an. Trennen Sie die Verbindung, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

**LESEN SIE DAS SERVICEHANDBUCH**  
für Fahr-, Sicherheits- und  
Wartungsanweisungen

Hersteller :

**BENOIT SYSTEMES**

📍 7 Rue du Pont, 21450  
Billy-Lès-Chanceaux, FRANCE

☎ (+33) 3 80 96 54 65

@ export@benoitssystemes.com

Vertrieb Deutschland :

🌸 **NHD**

NHD GmbH

📍 Miskolczy-Straße 7  
76689 Karlsdorf-Neuthard

☎ 07251 - 322 76 70

@ info@nhd.gmbh