

BENOIT SYSTEMES



LIGHT ASSIST 2.1


BENUTZERHANDBUCH



← *Folgen Sie uns!*

WWW.BENOITSYSTEMES.COM





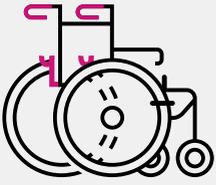

Ihr Rollstuhl ist mit **Hakenstangen und Haken** ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Ihren elektrischen Zusatzantrieb schnell zu montieren. An den hinteren **Griffen** des Rollstuhls sind Halterungen angebracht um die Light Assist Griffe anzubringen.

1 INSTALLATION DES POWER ADD-ONS

1. Ziehen Sie die Bremsen am Rollstuhl an, um das Installieren zu erleichtern.
2. Richten Sie die beiden Kupplungsgriffe nach hinten (Neutralstellung). Ziehen Sie bei Bedarf den schwarzen Kupplungsknopf. 
3. Halten Sie das Power Add-On mit seinem oberen Griff fest und setzen Sie die Achsen auf die Haken.
4. Stellen Sie sicher, dass die Achsen richtig positioniert sind.

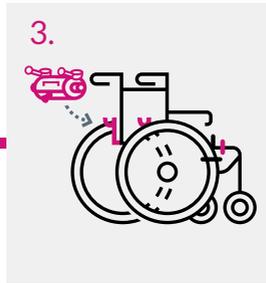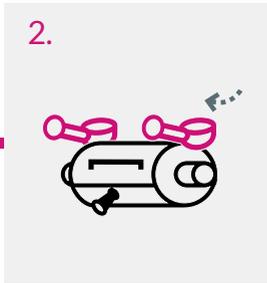

2 VERRIEGELUNG DER GRIFFE


1. Verlängern Sie beide Griffe, um mehr Kraft zu gewinnen.
2. Verriegeln Sie beide Griffe immer beginnend mit der rechten Seite.



3 INSTALLATION DER SCHIEBEGRIFFE

Zwei Griffe sind im Lieferumfang des Power Add-on enthalten:


Vorwärts/
Rückwärts-
Schalter

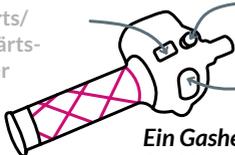

Ein Gashebel zum Fahren des Stuhls

Geschwindigkeitsbegrenzer

An/Aus
Schalter

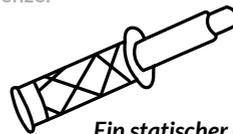

Ein statischer Griff, damit beide Griffe die gleiche Länge haben

Die Griffe werden mit einem Stift auf der linken oder rechten Seite der hinteren Griffe des Rollstuhls verriegelt.


4 EINSETZEN DER BATTERIE

1. Setzen Sie den Batterieträger auf den Batterieschlitten am Power Add-On.
2. Drücken Sie den Batterieträger fest an, bis die Stecker hörbar ineinander greifen.

1.




2.

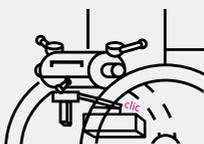


5 ANBRINGUNG DES KIPPSCHUTZES

Stecken Sie den Kippschutz in den hinteren Griff des Power Add-on (Rad nach unten gerichtet).

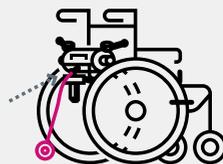

EXTRA FEATURE

Einfaches Entriegeln der Kupplungsgriffe genügt, um das Power Add-On zu lösen und Ihren gewohnten manuellen Rollstuhl zurückzubekommen.

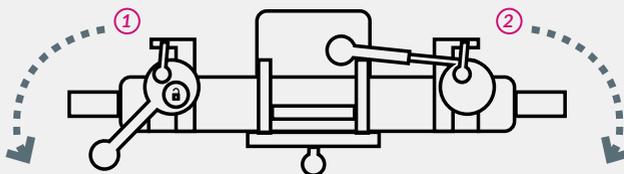

- ① Entriegeln Sie den linken Griff und drehen Sie ihn nach rechts.
- ② Entriegeln Sie den rechten Griff und legen Sie ihn ganz gegen die Rückenlehne.

ANWEISUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG

Bei beengten Platzverhältnissen gibt es 2 Lösungen:

1. Schalten Sie den elektrischen Aufsatz aus und bedienen Sie den Rollstuhl manuell.
2. Verwenden Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer, um den Power-Add-on bei einer sehr niedrigen Geschwindigkeit zu halten und fahren Sie den Rollstuhl mit dem Gasgriff.

Wenn sich ein Bürgersteig nähert:



- Halten Sie nicht an und versuchen Sie nicht, den Rollstuhl anzuheben!
- Langsam an den Bürgersteig heranfahren, den Rollstuhl kippen (Vorderräder auf dem Gehweg) und weiterfahren.

6 ABNEHMEN DES POWER ADD-ONS

Ziehen Sie die Bremsen am Rollstuhl an, um das Herausnehmen zu erleichtern.


1. Lassen Sie die Griffe eingerastet.
2. Entfernen Sie den Kippschutz und hängen Sie ihn an die dafür vorgesehene Stelle an der Batterie.
3. Entriegeln Sie die Batterie mit Hilfe der Rackverriegelung und ziehen Sie sie nach hinten.
4. Nehmen Sie den Joystick ab und stecken Sie ihn in die Aufbewahrungshalterung am Power Add-on und verstauen Sie ihn in der dafür vorgesehenen Position am Heck des Motors.
5. Stellen Sie die Griffe in die neutrale Position (ziehen Sie den schwarzen Knopf).

Heben Sie den Power-Add-on an, indem Sie den oberen Griff ergreifen. Die Achsen sollten sich von den Haken lösen.

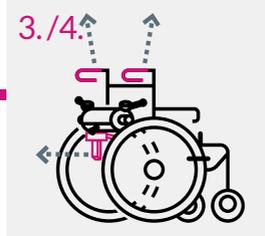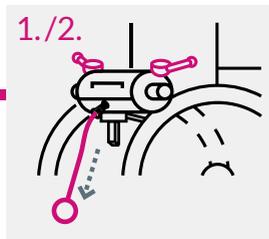

7 DAS AUFLADEN DER BATTERIE

Verbinden Sie die beiden roten Stecker von Akku und Ladegerät zusammen und schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an. Trennen Sie die Verbindung, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

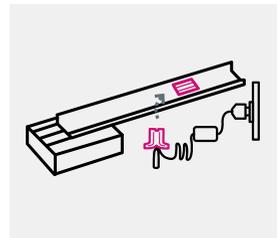

LESEN SIE DAS SERVICEHANDBUCH

für Fahr-, Sicherheits- und
Wartungsanweisungen

Hersteller :

BENOIT SYSTEMES

7 Rue du Pont, 21450
Billy-Lès-Chanceaux FRANCE
(+33) 3 80 96 54 65
@ export@benoitsystemes.com

Vertrieb Deutschland :

NHD

NHD GmbH

Miskolczi-Straße 7
76689 Karlsdorf-Neuthard
07251 - 322 76 70
@ info@nhd.gmbh